

PHILIPS

RESPIRONICS

Wisp




Wisp

Nasen-Maske mit minimaler Kontaktfläche

Traumhaft einfach, einfach Wisp

Intensive Befragungen von Ärzten, Fachhändlern und Patienten haben gezeigt, dass diese sich eine Maske mit weniger Komplexität und höherer Nutzerfreundlichkeit wünschen. Das Ergebnis: die Wisp. Die Wisp Nasen-Maske kombiniert die Leistung und den Komfort einer Nasen-Maske mit der ästhetischen Eleganz einer Minimal-Kontakt-Maske.

- Einfaches Design und hervorragende Abdichtung: Die Wisp kombiniert die Leistung und den Komfort einer Nasen-Maske mit dem einfachen Design einer Minimal-Kontakt-Maske. Durch nur wenige Einzelteile und die magnetischen Kopfband-Clips ist die Wisp einfach zu verwenden und zu pflegen.
- Ein freies Sichtfeld für größere Unabhängigkeit: Patienten können lesen, fernsehen und sogar Brillen tragen, bevor sie einschlafen.
- Flexibilität für Patienten: Die Wisp wird mit einem durchsichtigen, unauffälligen Silikonrahmen oder einem weichen, formbaren Stoffrahmen geliefert. Mit den drei Maskenkissengrößen in einer Packung finden 98% aller Patienten ihre passende Größe.

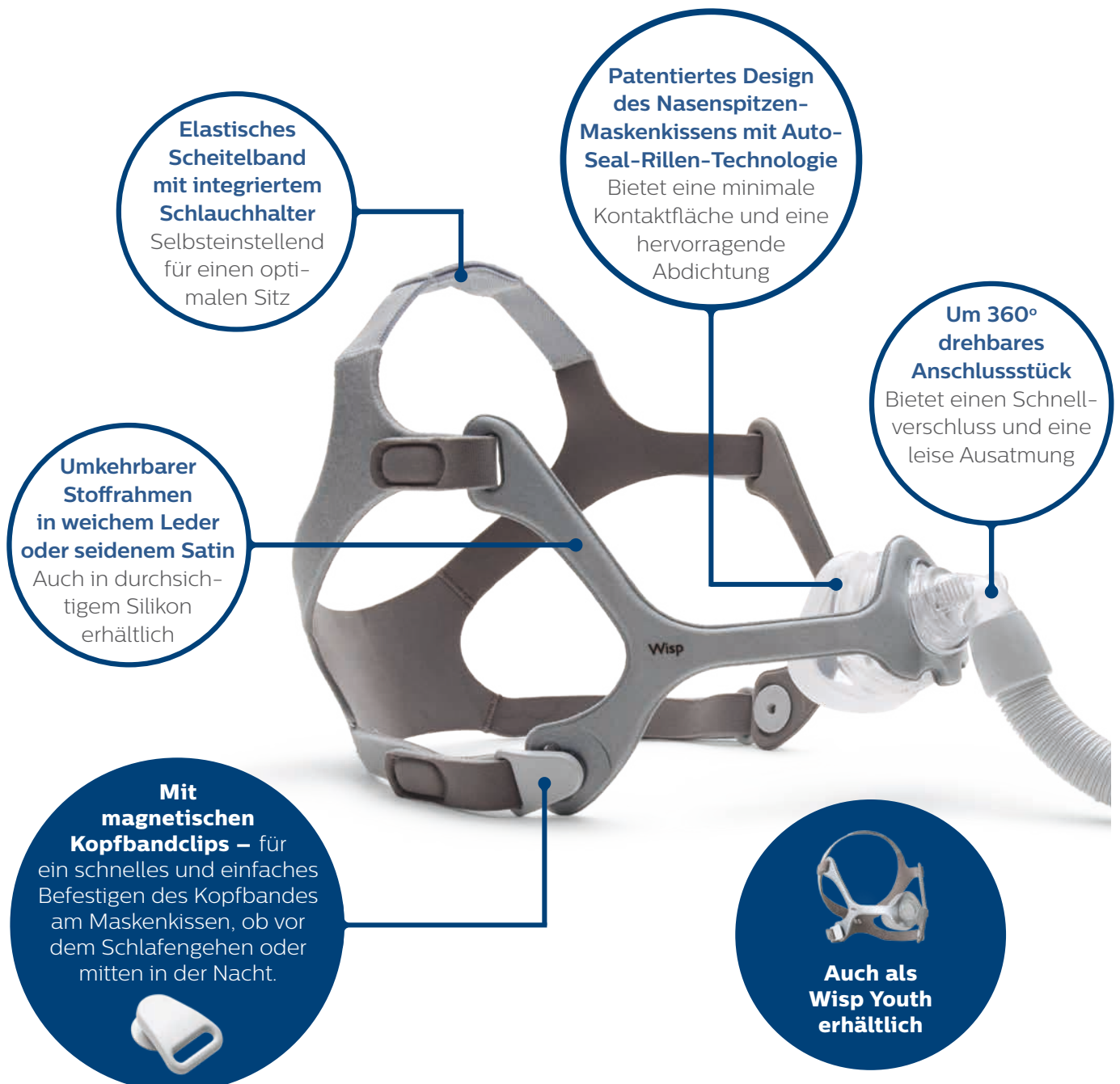

Anleitung zur Maskenanpassung

- 

1 Vor Anlegen der Maske wird die Maskenkissengröße bestimmt. Verwenden Sie die Anpassschablone, um das Maskenkissen auszuwählen, das zu Ihrer Nasenbreite passt, ohne die Nasenlöcher zu blockieren. Das obere Ende des Kissens sollte zwischen der Nasenspitze und dem Nasenrücken liegen.
- 

2 Lockern Sie das Kopfband und trennen Sie vor Anlegen der Maske die magnetischen Clips vom Kopfband.
- 

3 Halten Sie das Maskenkissen sanft in Position über der Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.

Hinweis: Das Kopfband sollte flach auf dem Hinterkopf anliegen.
- 

4 Halten Sie die Maske in Position und bringen Sie die Clips wieder am Maskenrahmen an.

Hinweis: Wenn Sie die Clips nicht verwenden möchten, können Sie die Laschen des Kopfbandes durch die Schlitze des Maskenrahmens fädeln.
- 

5 Ziehen Sie an den Laschen des Kopfbandes, um die oberen und unteren Bänder gleichmäßig einzustellen. Die Maske sollte bequem auf Ihrem Gesicht sitzen.

Hinweis: Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an. Das Kopfband sollte locker und bequem sitzen.
- 

6 Optional können Sie den Schlauch der Maske durch die Schlaufe des Scheitelbandes führen, bevor Sie den CPAP- Schlauch anschließen.

Hinweis: Die Verwendung des Schlauchhalters am Scheitelband kann für einige Schlafpositionen mehr Komfort bedeuten.
- 

7 Nehmen Sie verschiedene Schlafhaltungen ein. Bewegen Sie die Maske, bis sie komfortabel sitzt. Bestehen übermäßige Luftleckagen, nehmen Sie im Liegen endgültige Anpassungen vor.

Hinweis: Geringfügige Luftleckagen sind normal. Stellen Sie die oberen Riemen des Kopfbandes so ein, dass im Bereich um die Augen weniger Leckagen auftreten.

Hinweis: Weitere Informationen zum Anpassen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Bestellinformationen für den Fachhandel

Maske mit Ausatemventil und Kopfband (Standard)	
Wisp-Maske mit Silikonrahmen, 3 Größen*	Artikelnummer 1094060
Wisp-Maske mit Stoffrahmen, 3 Größen*	1094061
Maske ohne Ausatemventil, mit Kopfband (Standard)	
Wisp-Maske SE mit Silikonrahmen, 3 Größen*	1094062

* Im Lieferumfang sind drei Maskenkissen (S/M, L, XL) enthalten, die auf denselben Rahmen passen.

Für Kinder ab 7 Jahren oder ab 18 kg Körpergewicht eignet sich die Wisp Youth (1109308) mit den drei Maskenkissen (P, S/M, L) und dem kleineren Kopfband (RS).


Einzelteile und Zubehör



	Artikelnummer
Wisp Maskenkissen, Größe P	1094086
Wisp Maskenkissen, Größe S/M	1094087
Wisp Maskenkissen, Größe L	1094088
Wisp Maskenkissen, Größe XL	1112031



	Artikelnummer
Wisp-Kopfband, Standard	1094082
Wisp-Kopfband, klein (RS)	1109307
Wisp-Kopfband, groß	1094078



	Artikelnummer
Wisp Silikonrahmen	1094080
Wisp Stoffrahmen	1094081



	Artikelnummer
Wisp-Kopfband-Clips (2 St.)	1094083
Wisp-Kopfband-Clips, magnetisch (2 St.)	1120434



	Artikelnummer
Wisp-Schlauch und Anschlussstück	1105624