

LÖWENSTEIN
medical

JOYCEclinic Full Face

—
Single-Patient-Use-Maske

JOYCEclinic Full Face Einfach kompromisslos.

Mit unserer **Single-Patient-Use Full-Face-Maske** für die akute nicht-invasive Beatmung erleben Sie gewohnt gute Qualität von Löwenstein Medical.

JOYCEclinic Full Face ermöglicht gleichzeitig eine **schnelle, einfache Maskenanpassung** sowie einen **sicheren, komfortablen Maskensitz** – und das sogar bei Drücken bis 50 hPa.

Die auch bei hohen Drücken stabil sitzende Kopfbänderung lässt sich im Notfall durch eine klar **erkennbare Reißleine** schnell und unkompliziert diskonnektieren.

Dank **Single-Patient-Use** werden Querkontaminationen vermieden.

So müssen Sie auch in der Klinik trotz Kostendruck keine Kompromisse eingehen.

- Vermeidung von Querkontamination
- Druckstabiles Maskenkissen und Bänderung
- Reißleine

Mit Hilfe von 4 unterschiedlichen, austauschbaren Winkeladaptern finden Sie für jede Situation und Gerätekombination die passende Maskenvariante.

JOYCEclinic Full Face gibt es vorkonfektioniert in **3 Größen** in den Varianten **non-vented**, **non-vented mit AAV** und **vented mit AAV**. Die korrekte Größenbestimmung gelingt durch die Anpassschablone sicher und schnell – dank des Zwei-Kammer-Beutels sogar ohne die Maske zu berühren.

Der als praktisches Zubehör erhältliche **Endoskopie-Adapter** ermöglicht die Bronchoskopie, ohne die Beatmung unterbrechen zu müssen. Die Winkel NV, NV + AVV und Vented sind auch als **leicht austauschbare Ersatzteile** verfügbar.

Sämtliche Masken sind auch als Set aus 10 Masken ohne Zwei-Kammer-Beutel verfügbar. Dem Set wird eine Gebrauchsanweisung und Anpassschablone zugelegt.

- 3 Größen
- 4 wechselbare Winkel
- Anpassschablone
- Zwei-Kammer-Beutel
- Einzelmaske oder 10er-Set



Winkeladapter

Dank eines Hebels am Sicherungsring ist ein einfaches Lösen und schnelles Wechseln der Winkel jederzeit möglich.



NV ohne AAV*



NV mit AAV*



V mit AAV*



Endoskopieadapter

Drehgelenk-Adapter

Mit Hilfe des in allen Vented-Varianten integrierten Drehgelenk-Adapters kann auch ein CPAP-Schlauch genutzt werden.


Drehgelenk-Adapter




*AAV = Anti-Asphyxia-Valve (Notatemventil)

Wann nutze ich welchen Winkel?


NV-Winkel

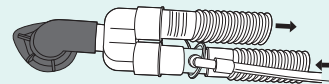

- Doppelschlauchsystem mit getrennter Inspiration und Expiration sowie geräteseitigem Expirationsventil

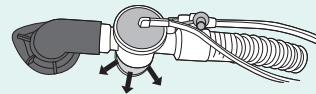


- Einschlauchsystem mit patientennahem Expirationsventil

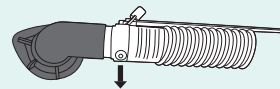

- Einschlauchsystem mit Ausatemleckage

NV- und AAV-Winkel

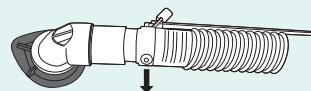


- Einschlauchsystem mit Ausatemleckage und zusätzlicher Sicherheit bei Geräteausfall (Anti-Asphyxie-Ventil)
- Standardkombination bei Beatmungsgeräten mit Leckagesystem



- Einschlauchsystem mit patientennahem Expirationsventil darf nicht verwendet werden.
- Der Flow ist nicht ausreichend hoch, um das Notfallausatemventil offen zu halten.

Vented-Winkel

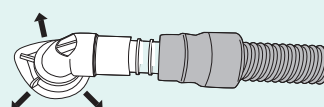

- Adapter und CPAP-Schlauch für die Verwendung von prisma VENT oder vergleichbaren Beatmungsgeräten

JOYCEclinic Full Face



Bestellinformation

Artikel, je Verpackungseinheit 1 Stück	Artikelnummer	Artikel, je Verpackungseinheit 10 Stück	Artikelnummer
JOYCEclinic Full Face NV <ul style="list-style-type: none">• Größe S• Größe M• Größe L	WM 26805 WM 26815 WM 26825	JOYCEclinic Full Face NV <ul style="list-style-type: none">• Größe S• Größe M• Größe L	WM 26857 WM 26858 WM 26859
JOYCEclinic Full Face NV + AAV <ul style="list-style-type: none">• Größe S• Größe M• Größe L	WM 26845 WM 26855 WM 26865	JOYCEclinic Full Face NV + AAV <ul style="list-style-type: none">• Größe S• Größe M• Größe L	WM 26869 WM 26870 WM 26871
JOYCEclinic Full Face vented <ul style="list-style-type: none">• Size S• Size M• Size L	WM 26840 WM 26850 WM 26860	JOYCEclinic Full Face vented <ul style="list-style-type: none">• Größe S• Größe M• Größe L	WM 26866 WM 26867 WM 26868

Zubehör

Endoskopieadapter	WM 15864
-------------------	----------

Ersatzteile

Winkel NV	WM 25269	Kopfbänderung JOYCEclinic Full Face (5 Stück)	WM 26835
Winkel NV + AAV	WM 26834	Drehgelenk-Adapter*	WM 26916
Winkel vented	WM 26833		

* im Lieferumfang der Vented-Variante enthalten

Technische Daten

Produktklasse nach Richtlinie 93 / 42 / EWG	IIa	Therapiedruckbereich	4 hPa - 50 hPa
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	22 mm (weiblich)	Geometrischer Totraum	
		Größe S	225 ml
		Größe M	255 ml
		Größe L	305 ml

CE 0197

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.




Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



 Menschen im Mittelpunkt